

### Ruftaster mit Nebensteckanschluss

Artikelnummer:

1204-w-PT1



Abbildung ähnlich

#### Leistungsmerkmale:

Dient zum Auslösen und Rückstellen von Rufen und Notrufen in Bewohnerzimmern und Räumen. Die Quittierung des Auslösebefehls erfolgt durch Aufleuchten eines roten Beruhigungslichtes im Taster. Über eine RJ45-Buchse können Zusatzgeräte wie Birntaster, Funkfinger und Sensorrufmatten angeschlossen werden.

mit Beruhigungslicht,  
mit Piezosignalgeber,  
mit Findelicht,  
für Auf-/Unterputz-Installation

#### Anschlussbelegung:

1	GND	(blau)
2	+12 VDC	(rot)
3	DAE	(weiß-gelb)
4	LArt	(gelb)
5	LAgN	(grün)

Licht 1	Licht 1
Licht 2	Licht 2
Abriss2	Abriss 2
Abriss1	Abriss 1



Abbildung ähnlich

#### Elektrische Daten:

Betriebsspannung: 12 V DC  
Leistungsaufnahme: 32 mW

#### Konstruktive Daten:

- für Auf-/Unterputz-, Brüstungskanal-Installation in Standard UP-Dosen
- inkl. Zentralplatte im Gerätestandardmaß 50x50 mm
- passend z.B. Berker S1
- Farbe polarweiß  
Ähnlich RAL 9010

Stand 27.09.2022 / Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.



**Konfiguration des Dip-Schalters:**

Mit Hilfe des Dip Schalters kann der Taster auf verschiedenste Weisen konfiguriert werden. Es folgt eine Übersicht der Schalter und die zugehörigen Funktionen:

Schalternummer	Zustand	Funktion
1	ON	Schaltet einen Abschlusswiderstand in Höhe von 27 kOhm auf den DAE des Zimmers
	OFF	Schaltet keinen Abschlusswiderstand auf den DAE des Zimmers
2	ON	Stellt ein, dass der Nebensteckkontakt bei Auslösung über ein angeschlossenes Gerät die ID <b>PT1</b> (Ruf aus Zimmer) sendet
	OFF	Stellt ein, dass der Nebensteckkontakt bei Auslösung über ein angeschlossenes Gerät die ID <b>PTWC</b> (Ruf aus WC) sendet
3	ON	Stellt ein, dass der Taster bei Betätigung der roten Taste die ID <b>PT1</b> (Ruf aus Zimmer) sendet
	OFF	Stellt ein, dass der Taster bei Betätigung der roten Taste die ID <b>PTWC</b> (Ruf aus WC) sendet
4	ON	Stellt das Findelicht für angeschlossene Geräte am Nebensteckkontakt an
	OFF	Stellt das Findelicht für angeschlossene Geräte am Nebensteckkontakt aus
5	ON	Stellt das Findelicht für den Taster an
	OFF	Stellt das Findelicht für den Taster aus
6	ON	Keine Funktion
	OFF	Keine Funktion

**Achtung:**

Es ist wichtig zu beachten, dass normale Rufe im Zimmer nur dann abgestellt/quittiert werden können, wenn die Kennung **ST** gesendet wird. Die Kennung **STWC** kann lediglich die Rufarten **Ruf aus WC** und **Notruf aus WC** abstellen. Es wird daher empfohlen die Kennung **STWC** nur dann zu aktivieren, wenn der Taster explizit zum Abstellen von Rufen aus WC oder Bad genutzt werden soll.