

## Doppelzugtaster Zug-Ruftaster mit Zug- Anwesenheits/Abstelltaster

Artikelnummer:

1017-w-PT1



Abbildung ähnlich

### Leistungsmerkmale:

Zugtaster werden als Ruf-Auslöseeinrichtungen vorrangig in Bädern/WCs oder anderen sanitären Einrichtungen eingesetzt. Die Auslösung des Rufes erfolgt durch Ziehen an der roten Zugschnur. Über die grüne Zugschnur kann der Ruf abgestellt bzw. eine Anwesenheit gesetzt werden. Die Rufnachsendung erfolgt akustisch über einen Piezo Signalgeber. Über ein DIP-Switch kann zwischen WC- und Zimmerkonfiguration der Taster gewechselt werden.

### Weitere Merkmale:

- inklusive elektrischem Identelement mit Beruhigungslicht
- Länge der roten Schnur ca. 3 m
- Länge der grünen Schnur ca. 1 m
- Abriss der Schnüre bei 7 kg  $\pm$  2 kg
- Schnüre können bei Bedarf, durch Kordelende, gekürzt werden

### Anschlussbelegung

1	GND	(blau)
2	+12 VDC	(rot)
3	DAE	(weiß-gelb)
4	LArt	(gelb)
5	LAgn	(grün)

### Hinweis:

Die Farben der einzelnen Adern können je nach Kabeltyp abweichen. Die hier angegebenen Farben beziehen sich auf ein Standard „J-Y(St)Y 4\*2\*0,6“ Kabel.

Stand 09.11.2020 / Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

### Elektrische Daten:

Betriebsspannung: 12 V DC  
Leistungsaufnahme: 12 mW

### Konstruktive Daten:

- für Auf-/Unterputz-, Brüstungskanal-Installation in Standard UP-Dosen
- inkl. Zentralplatte im Gerätestandardmaß 50x50 mm
- Farbe polarweiß  
Ähnlich RAL 9010

### Konfiguration des Dip-Schalters:

Mit Hilfe des Dip Schalters kann der Taster auf verschiedenste Weisen konfiguriert werden. Es folgt eine Übersicht der Schalter und die zugehörigen Funktionen:

Schalternummer	Zustand	Funktion
1	ON	Schaltet einen Abschlusswiderstand in Höhe von 27 kOhm auf den DAE des Zimmers
	OFF	Schaltet keinen Abschlusswiderstand auf den DAE des Zimmers
2	ON	Stellt ein, dass der Taster bei Betätigung der Ruftaste die ID <b>PT1</b> (Ruf aus Zimmer) sendet
	OFF	Stellt ein, dass der Taster bei Betätigung der Ruftaste die ID <b>PTWC</b> (Ruf aus WC) sendet
3	ON	Beim Betätigen des grünen Zugtasters wird die Kennung <b>ST</b> gesendet (Schwester im Zimmer)
	OFF	Beim Betätigen des grünen Zugtasters wird die Kennung <b>STWC</b> gesendet (Schwester im WC)
4	ON	Keine Funktion
	OFF	Keine Funktion

### Achtung:

Es ist wichtig zu beachten, dass normale Rufe im Zimmer nur dann abgestellt/quittiert werden können, wenn die Kennung **ST** gesendet wird. Die Kennung **STWC** kann lediglich die Rufarten **Ruf aus WC** und **Notruf aus WC** abstellen. Es wird daher empfohlen die Kennung **STWC** nur dann zu aktivieren, wenn der Taster explizit zum Abstellen von Rufen aus WC oder Bad genutzt werden soll.

### Umbau auf neue Zugtaster:

